

Als eerste wordt de huid voorbehandeld d.m.v. diamant- microdermabrasie, waarbij dode huidcellen worden verwijderd. Dit is niet gevoelig. De aanmaak van nieuwe huidcellen en een goede doorbloeding van de huid worden hierdoor bevorderd. Deze voorbehandeling is bij de prijs inbegrepen.

Hierna krijgt de klant een speciale bril op om de ogen tegen het licht te beschermen. Dan wordt er begonnen met de laserbehandeling. Met behulp van een handstuk, dat langzaam over uw huid heen en weer wordt bewogen, worden de laserpulsjes precies daar 'afgevuurd' waar dat nodig is. De NLite-V werkt snel: een totale gezichtsbehandeling duurt meestal niet langer dan 30 - 40 minuten. Uw huid kan wat gaan tintelen en het is mogelijk dat u ervaart dat uw huid wat warmer wordt. Dat is echter alles wat u van de behandeling merkt.

Hierna worden nog werkstoffen op de huid aangebracht en naar wens minerale make-up.



## De NLite-V-laser is geschikt voor:

- Huidverbetering
- Zonbeschadigde huid
- Rokershuid
- Huidverjonging en huidverslapping
- Acne
- Littekens
- Wijnvlekken
- Eczeem en psoriasis
- Rosacea
- Couperose
- Gesprongen en ontsierende adertjes
- Meeëters en verstopte poriën
- Grove en verwijde poriën

Alle informatie over de NLite-V-laserbehandelingen kunt u krijgen bij:



Varsseveldseweg 55  
7131 JA Lichtenvoorde  
t: 0544 371509

NLite V-laser, Infraroodlaser, LED-therapie, Diamant Dermabrasie, Bio Skin Jetting, Micro Needling, peelings, permanente make-up, T-Away, IPL-, elektrisch ontharen, figuurcorrectie, acne-behandelingen, diverse relaxbehandelingen, tanden bleken, Francine Colour Experiments minerale make-up etc.

aangesloten bij:



# Cosmetisch Instituut Francine

## De NLite-V-laser: Facelift zonder operatie



### Openingstijden:

Maandag en donderdag  
van 9.00 tot 21.00 uur  
Dinsdag van 12.30 tot 21.00 uur  
Woensdag en vrijdag  
van 9.00 tot 17.30 uur

Behandeling uitsluitend op afspraak

De informatie in deze folder is onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.



www.francine.nl Varsseveldseweg 55  
info@francine.nl 7131 JA Lichtenvoorde  
0544 371509

## Wat is NLite-V?

NLite-V is een Pulse Dye-laser die kan worden ingezet bij de behandeling van diverse huidproblemen. De laser maakt gebruik van *SmartPulse™*, een lichtbundel met een unieke samenstelling die gepatenteerd is en uitsluitend verkrijgbaar is met het NLite-V-systeem. In Nederland zijn slechts 6 locaties waar deze unieke behandeling kan worden uitgevoerd EN DAAR ZIJN WIJ ER EEN VAN!

## Waarvoor wordt de NLite-V gebruikt?

De laser is heel succesvol bij de behandeling van acne, problemen met (kleine) bloedvaten en huidveroudering. Het is klinisch bewezen dat de NLite-V acne-ontstekingen vermindert en acne-littekens en verkleuringen minder zichtbaar maakt. Ook wijnvlekken, couperose en rosacea kunnen met de NLite-V heel effectief worden verfraaid en zelfs verwijderd. De mooiste resultaten worden geboekt op het gebied van huidverjonging: fijne lijntjes en kraaienpootjes verdwijnen en rimpels worden minder diep. Uw huid wordt dikker en steviger: **dankzij de NLite-V ziet u er jaren jonger uit.**

## Hoe werkt de NLite-V bij acne?

De unieke lichtbundel van de NLite-V laser doodt en vermindert de bacteriën die acne veroorzaken en bestrijdt op deze manier ontstekingen. Tegelijkertijd stimuleert de laser het natuurlijk herstellend vermogen van de huid.



Acne vóór en na de behandeling met de NLite-V




## Anti-aging

De NLite-V bevordert de aanmaak van collageen waardoor uw huid dikker en steviger wordt, rimpeltjes vervagen en littekens minder zichtbaar worden. De NLite-V gebruikt verschillende programma's voor de behandeling van verschillende aandoeningen. Bij de behandeling van roodheid wordt bijvoorbeeld een hoger energieniveau gebruikt dan bij de behandeling van acne of huidveroudering. De bloedvaatjes en adertjes die roodheid veroorzaken worden door de lichtbundel vernietigd, maar de huid blijft onbeschadigd.

Afhankelijk van de conditie van uw huid en uw levensstijl, blijft het resultaat dat is behaald met de NLite-V ongeveer een jaar zichtbaar. We adviseren een herhalingsbehandeling 2 à 3 keer per jaar.

Of het nu gaat om de behandeling van acne, roodheid of huidveroudering: een behandeling met de NLite-V laser past bij bijna iedereen. Bij de intake analyseren we de conditie van uw huid en zullen we u precies vertellen welk resultaat u kan en mag verwachten. Afhankelijk van uw wensen en de te verwachten resultaten spreken we vervolgens samen met u een behandelplan af.

Over de hele wereld hebben mannen en vrouwen inmiddels kennisgemaakt met de NLite-V-methode. Vrijwel allemaal zijn ze erg enthousiast over deze nieuwe weg naar een gezondere, zachtere en jongere huid.

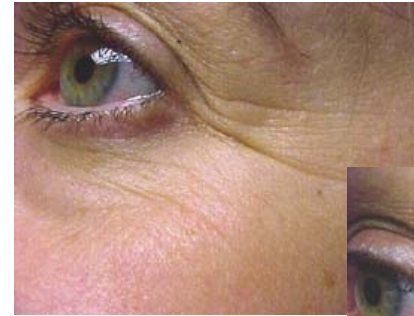


rimpels vóór (links) en na (onder) de behandeling met de NLite-V



## Hoe werkt deze (veilige) laser?

Beschadigd collageen wordt vervangen door nieuwe, gezonde vezels, omdat het gele laserlicht de aanmaak van collageen stimuleert. Doordat het laserlicht in de bloedvaten groeistoffen vrijmaakt, wordt de huid gestimuleerd om nieuw, lichaamseigen collageen aan te maken en een gezond, elastisch netwerk te vormen. Dit proces blijft nog een lange tijd doorgaan en het resultaat blijft dus lang zichtbaar: fijne lijntjes en rimpeltjes zie je ongeveer een jaar niet meer! Meestal zijn de eerste resultaten al na de eerste behandeling zichtbaar. De behandelingen vinden om de 2 weken plaats en, afhankelijk van de conditie van de huid, worden in kuurverband 3-5 behandelingen gegeven. Omdat het laserlicht pas actief wordt in de diepere lagen van de huid blijft deze onbeschadigd.

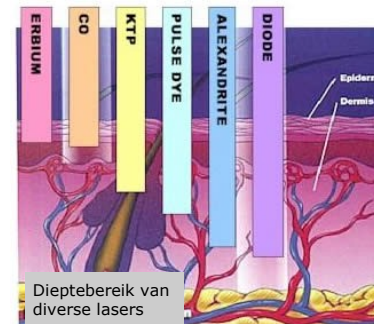

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat **één** Nlite-V-behandeling de collageenproductie gemiddeld met **84%** doet toenemen en een rimpelvermindering van **60%** bewerkstelligt. Deze resultaten zijn aangetoond in een recent onderzoek dat plaats heeft gevonden in Amerika. In september 2000 is de Nlite-V-laser door de FDA (Amerikaanse inspectie voor voeding en geneesmiddelen) goedgekeurd voor het gebruik ten behoeve van rimpelvermindering. In 2003 werd in het gezaghebbende medische tijdschrift "The Lancet" een zeer positief artikel gepubliceerd over de werking van de NLite-V op acne.

## De behandeling

Tijdens het intakegesprek wordt duidelijk uitleg gegeven over de NLite-V-behandeling door één van onze deskundige specialisten. Ook wordt besproken welk gebied u wilt laten behandelen, b.v. gelaat, hals, décolleté of handen. Hierna worden foto's genomen van het te behandelen gebied, die discreet in het klantendossier bewaard worden, om de resultaten goed te kunnen beoordelen.